


Souprava pro testování antigenu 2019-nCoV

(Imunochromatografie z koloidního zlata)

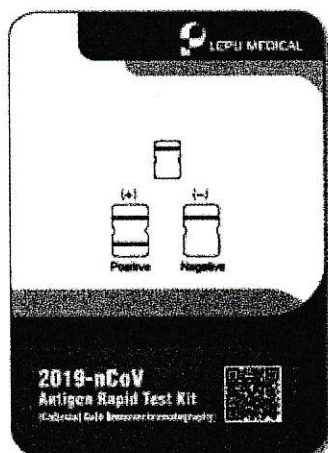

NOVÁ STUDIE

Senzitivita 95,05 % (až 98,54 % při Ct<25)
Specifická 99,62%


- 1 Setrný výtěr z přední části nosu
- 2 Neinvazivní
- 3 Jednoduché použití
- 4 Praktický, není potřeba přístroj
- 5 Rychlý, výsledek za 15 minut
- 6 Stabilní, s vysokou přesností
(O spolehlivosti testu se můžete přesvědčit přímo z rozsáhlé studie, kterou naleznete www.quickweal.eu)
- 7 Testy splňují všechny podmínky, které ZP požaduje
- 8 Test proplácen zdravotní pojišťovnou

Souprava je určena ke kvalitativní detekci antigenu 2019-nCoV v klinickém vzorku. Testovací kazeta je založena na specifické reakci protilátka-antigen a technologii imunochromatografie.


WHO doporučuje imunotesty k detekci antigenu v diagnostice infekce 2019-nCoV.

| Vzorek | Výsledek | Balení |
|--------------|------------|--------|
| výtěr z nosu | za 15 min. | 25 ks |


Návod k použití

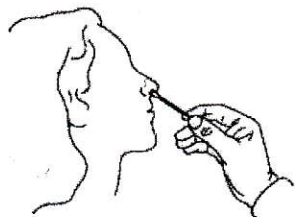


Krok 1: Odeberte vzorek pomocí výtěrové tyčinky

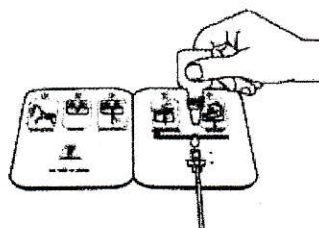

Krok 2: Protáhněte výtěrovou tyčinku se vzorkem jamkou B do jamky A a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

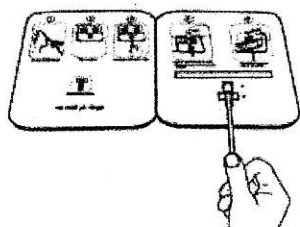

Krok 3: Tyčinku dvakrát otočte ve směru a proti směru hodinových ručiček.

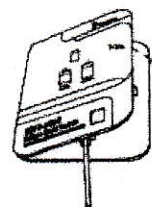

Krok 4: Odstraňte ochranný kryt fixačního lepidla. Slepte levou a pravou stranu k sobě a vyčkejte 15 minut.

Interpretace výsledku

Pozitivní (+)



Negativní (-)



Neplatný

